

Respirátor 610

Hlavní rysy

Respirátor poskytuje ochranu proti prachu a kapalných aerosolů.

Materiály

Tyto materiály se používají v respirátoru:

Popruhy - Přírodní kaučuk

Nosní svorka- Polypropylen / Železné dráty

Filtrování a krycí medium - Polypropylen

Exhalační ventil - Polypropylen / Přírodní kaučuk

Nanovlákn




Standardy

Respirátor byl testován na evropské normy EN 149: 2001 + A1: 2009 a splnil požadavky kategorie FFP2. Dýchací přístroj může být použit v prostředích, které obsahují až do 12-ti násobkem OEL kontaminující látky, proti nízké koncentraci netoxických plynů a par pod mezní hodnotou a proti ozónu až do 10 x OEL.


Varování

- Nositel musí být vyškolen ve správném používání výrobku.
- Používejte jen v dostatečně větraných prostorách.
- Respirátor by neměly být nošeny osobami, jejichž obrysy obličeje, hluboké jizvy nebo jiné deformace tváře zabrání adekvátnímu utěsnění, které musí být vytvořeno mezi respirátorem a obličejem.
- Respirátore je potřebný zbavit se a nahradit jej pokud se poškodí nebo je-li se dýchání stává zatěžující.
- Respirátor by neměl být čištěn; je určen k jednorázovému použití.
- Účinnost respirátoru je závislá na koncentraci aerosolu a fyzické námahy.
- Respirátor musí být zlikvidován po jednorázovém použití.
- Respirátor nechrání uživatele před plyny, parami nebo v prostředí, kde je koncentrace kyslíku nižší než 17% v objemu.
- Před nasazením zkontrolujte, zda respirátor není poškozen.

Návod na použití

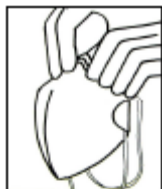

1. Otevřete respirátor podle rozevírací svorky respirátoru.

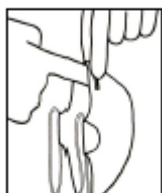

2. Předlisek nosní svorky jemně ohnete podle obrázku.



3. Umístěte respirátor pod bradou s nosní svorkou nahoru a vytáhněte popruhy přes hlavu.



4. Vyformujte nosní svorku do tvaru nosu stláčením mezi vašimi prsty.



5. Zkontrolujte usazení respirátoru: inhalovat ostře. Nicméně, měli byste zjistit vnikání vzduchu, těsnost respirátoru můžeme zlepšit

- Korekce polohy respirátoru.
- Přenastavení hlavici.
- Korekce polohy popruhů.